

**Indicaciones:**

CUANTUM Cura rápido *plus+* es un adhesivo tisular de uso veterinario indicado para la protección y el cierre de heridas en animales de compañía.

Descripción del producto:

CUANTUM Cura rápido *plus+* es un líquido violeta transparente de alta viscosidad, lo que facilita una aplicación precisa. En contacto con la piel y los exudados solidifica en pocos segundos creando una capa flexible y resistente que sella la herida y la protege frente a infecciones y agentes externos. El film transparente formado es 100 % resistente al agua y de larga duración, eliminándose de manera natural a medida que se regenera y crece la capa dérmica afectada.

Instrucciones de uso:**Previo a su aplicación:**

- 1) Afeitar la zona objeto de la aplicación y asegurar que esté limpia y seca.
- 2) El sitio de aplicación debe estar libre de sangre y exudados para una mejor adhesión y evitar un exceso de liberación de calor al solidificar el producto.
- 3) El adhesivo debe estar a temperatura ambiente en el momento de su uso.

Aplicación:

- 1) Retirar el tapón girando hacia la izquierda. Opcionalmente, insertar una punta aplicadora para una mayor precisión en la aplicación.
- 2) Colocar el envase boca abajo hasta que el líquido alcance la boca del aplicador.
- 3) Aproximar los bordes de la herida o incisión quirúrgica a sellar.
- 4) Presionar el envase para forzar la salida del adhesivo y aplicar de manera tópica sobre la zona afectada creando una película delgada.
- 5) Esperar a que la capa formada esté completamente seca para liberar los bordes de la herida o incisión quirúrgica (el tiempo de secado suele estar entre los 30 segundos y 1 minuto en función de la cantidad dosificada).
- 6) Finalizada la aplicación, desechar la punta aplicadora de precisión, limpiar la boca del aplicador con papel de celulosa y cerrar con el tapón hasta el siguiente uso.

Eliminación, almacenaje y conservación:

- El producto se elimina de forma natural a medida que se regenera y crece la capa dérmica afectada.
- Conservar preferentemente en un lugar fresco y seco (lejos de fuentes de calor). Mantener el envase en posición vertical.
- El adhesivo es un líquido viscoso. Desechar el producto en caso de que no presente fluidez.

Precauciones y advertencias:

- ▣ Aplicar el producto en capas finas. Las capas gruesas retrasan el secado y pueden desprenderse prematuramente.
- ▣ Solo para uso externo. No aplicar el producto por debajo de la epidermis.
- ▣ No utilizar sobre sustratos de celulosa, algodón o poliuretano (gasas, aplicadores con punta de algodón o de espuma, etc.), así como sustancias básicas (jabones, etc.). Estos materiales pueden causar una reacción exotérmica excesiva.
- ▣ Evitar el contacto del adhesivo con guantes e instrumentos quirúrgicos (el adhesivo polimerizado en los instrumentos puede eliminarse fácilmente con acetona). En caso de su aplicación en una zona no deseada se puede retirar con papel de celulosa.
- ▣ No usar en o alrededor de los ojos, quemaduras o zonas con infección.
- ▣ En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de párpados adheridos no intentar separarlos, se liberarán en pocos días de manera natural sin efectos adversos.
- ▣ Contiene cianoacrilato. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos.
- ▣ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ▣ Solo para uso veterinario.



Fabricado por:

CUANTUM MEDICAL COSMETICS, S.L.
Edifici Eureka, Campus UAB, Avda. Can Domènech, s/n
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Spain +34 658 875 835

Rev. 11/2018